



BOLSA DE AGUA CALIENTE



2
LITROS



PH1571



PH1572



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	EAN	CAPACIDAD	MATERIAL BOLSA	FORRO	TAPÓN Y ANILLO
PH1571	22609031	8425319708843	2 litros	55% Goma natural + Aditivos: carbonato cálcico, tinte y aceite	FORRO LANA: 100% lana de poliéster, extraíble y lavable en lavadora	Antigoteo y antifuga 100% polipropileno
PH1572	22609032	8425319708850			FORRO POLAR: 100% poliéster, extraíble y lavable en lavadora	

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	MEDIDA PRODUCTO (cm) (Largo x Ancho x Alto)	PESO NETO (g) (producto)	MEDIDA EMBALAJE (cm) (Largo x Ancho x Alto)	PESO BRUTO (g) (con embalaje)
PH1571	22609031	20 x 37 x 1,9	450	20 x 40 x 1,9	550
PH1572	22609032				

INFORMACIÓN ADICIONAL

INDICACIONES: el forro ayuda a reducir el riesgo de quemaduras por contacto directo y prolongado. Contribuye a prolongar más tiempo el calor. Durante el invierno es ideal para calentar y proporcionar una sensación térmica de calidez. Contribuye a aliviar dolores musculares y menstruales.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Antes de utilizar, revise la bolsa de agua y el tapón para detectar posibles deterioros y desgastes. 2. Sostenga la bolsa por el cuello en posición vertical y llénela lenta y cuidadosamente para evitar salpicaduras de agua caliente. 3. No utilice agua hirviendo (máximo 80°C), ya que el calor excesivo puede dañar la bolsa y provocar quemaduras. 4. No llenar más de 2/3 su capacidad total, el sobrellenado podría causar el estallido de la bolsa. 5. Extraiga suavemente el aire del interior hasta que el agua aparezca próxima al cuello de la bolsa de agua. 6. Enrosque el tapón con firmeza y asegúrese de que el embudo y el cuello están limpios de agua. 7. Compruebe que el tapón está bien enroscado antes de usarla. 8. Nunca utilice la bolsa como cojín ni se siente sobre ella, ya que podría reventar. 9. Para mantener la bolsa en perfecto estado, cuando no la utilice, guárdela vacía y destapada sin colocar nada encima, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES: las bolsas de agua caliente sin forro pueden causar quemaduras en caso de contacto directo y prolongado con la piel, por lo que se recomienda utilizar un forro para prevenir este tipo de lesiones. Para evitar cualquier riesgo de asfixia, mantenga esta bolsa fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con superficies calientes y la exposición a la luz solar. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

MANTENIMIENTO: guardar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

NORMATIVA: CUMPLE CON LA NORMA BS1970:2012. Esta certificación garantiza su resistencia al calor, ausencia de fugas y el uso de materiales seguros. Una garantía de calidad y seguridad que contribuye a prevenir posibles lesiones derivadas del uso de productos no certificados.

DURABILIDAD RECOMENDADA: 2 años.